

Indicação de Uso

O Health Fog foi desenvolvido para **minimizar o embaçamento** e reduzir a estática das lentes de ótica, substituindo o uso inadequado de **garrafas térmicas** durante os procedimentos de vídeo cirurgias.



Sem Health Fog

Imagens embaçadas, sem definição e nitidez.



Com Health Fog

Imagens **nítidas** por mais tempo durante o procedimento cirúrgico.

299093 - HEALTH FOG ESTÉRIL 10ML C/ ESPONJA ADESIVA

Esterilizado em Raio Gama

ANVISA: 80166330079

Validade: 3 anos

- » Solução Incolor estéril
- » Embalado em PGC



INSTRUÇÃO DE USO:

1 - Pingar aproximadamente 5 gotas da solução Health Fog na esponja autoadesiva;

2 - Friccionar o elemento ótico na esponja embebida com a solução;

3 - Iniciar a utilização do componente ótico.

*se houver necessidade de repetir o processo, limpe a ponta do elemento ótico, e retome o primeiro passo.